



## Pima CD4

### Подготовка образца крови из пальца: Принадлежности и работа

Alere Technologies GmbH, Jena, Germany





# Перчатки



Используйте перчатки без талька

# Спиртовая салфетка



Для дезинфекции  
поверхности пальца

# Сухая салфетка



Для вытирания крови и закрытия ранки на пальце после взятия образца




# Безопасный ланцет

**Sarstedt®** Safety Lancet



Для прокола пальца

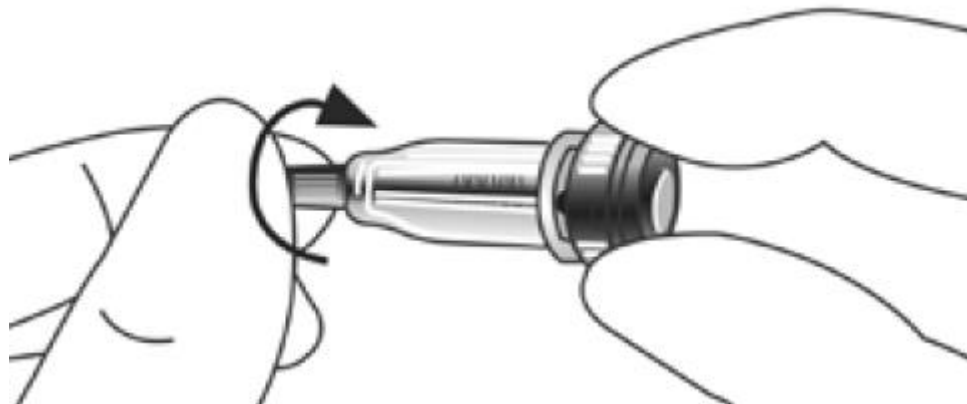

Удалить наконечник путем вращения



# Ланцет




**извлечь ланцет, крепко нажав на кнопку триггера**






# Pima CD4 картридж

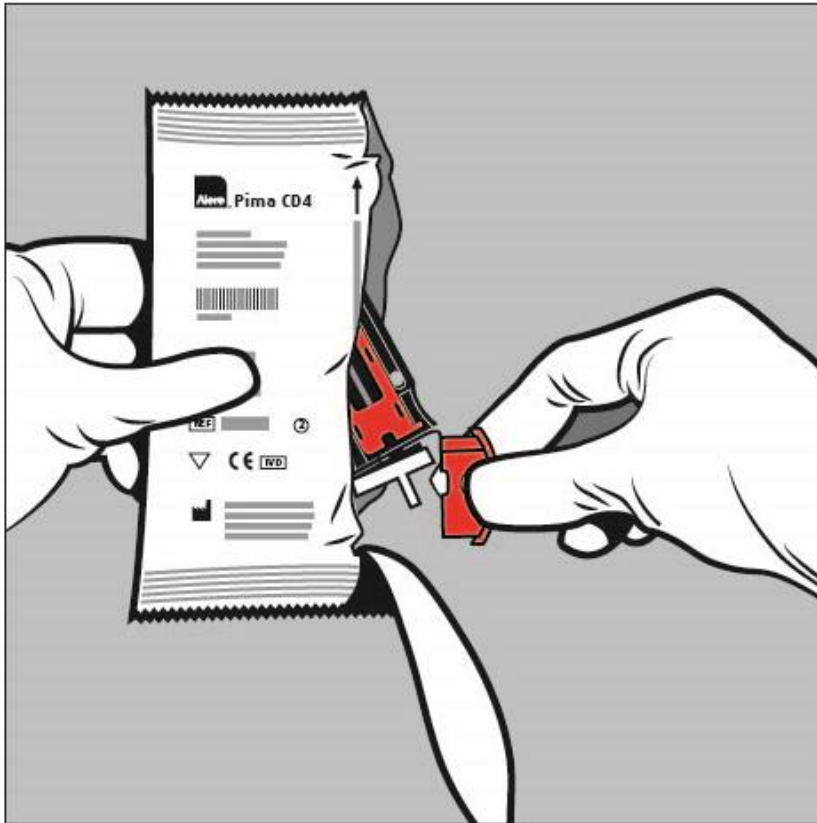

# Лейкопластырь

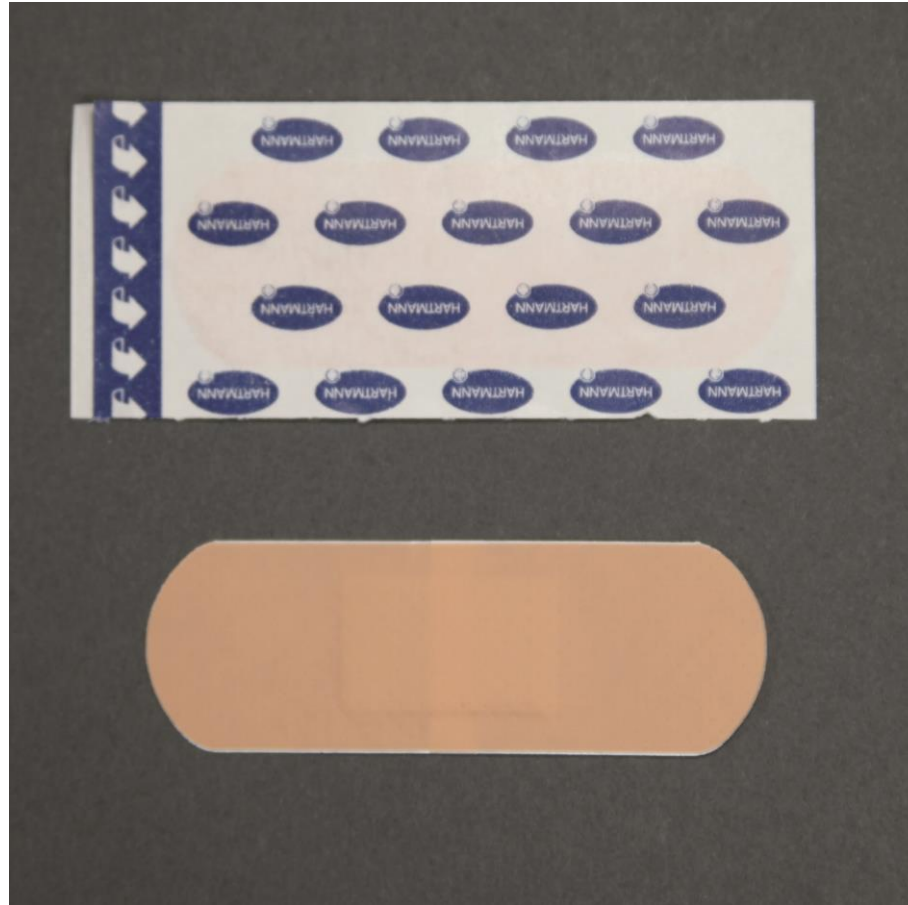

Заклеить ранку

# Контейнер для биоотходов



Для использованных ланцета, салфеток,  
коллектора крови картриджа



# Начнем!





- сожмите кулак, большой палец вверх


## Позиция руки



- Твердо держать выбранный палец, обеспечивая поддержку своим собственным большим и указательным пальцами



# Позиционирование ланцета

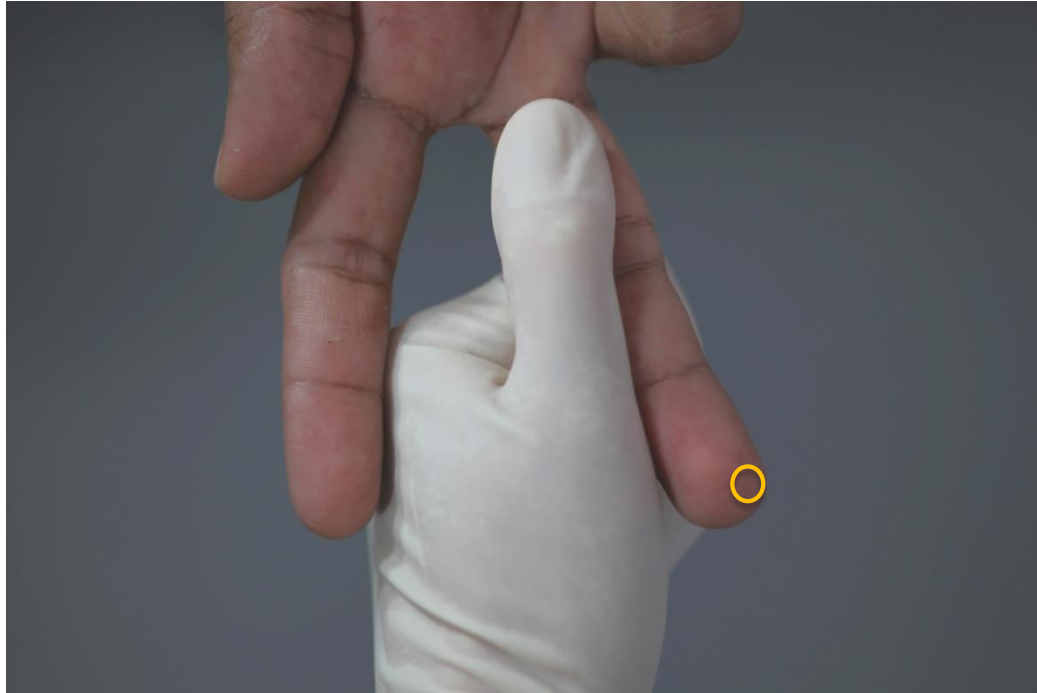



# Прокол подушечки пальца

