

Экспресс-тест на Гепатит

Determine™ HBsAg



Постановка теста Детермин гепатит В - HBsAg с цельной кровью

1 Отделите по перфорации тест-полоску




Отрывать по перфорации тест-полоски следует с правой стороны карты, начиная сверху, с тем, чтобы на карте сохранялся номер серии, напечатанный на левой стороне карты

2 Удалите защитную фольгу



3 Нанесите тестируемый сыворотки/плазмы крови

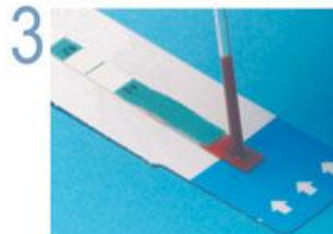

Нанесите 50 мкл образца сыворотки/плазмы с помощью микропипетки на стартовую зону тест-полоски (помечена стрелками)



Подождите 1 минуту

4 Добавьте буфер




Нанесите из капельницы, располагаемой строго вертикально, 1 каплю буфера на стартовую зону тест-полоски



Подождите 15 минут

5 Прочтите результат

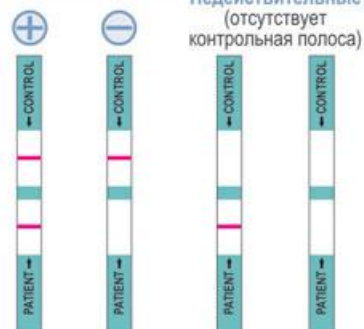

Постановка теста Детермин гепатит В с сывороткой/плазмой крови

1 Отделите по перфорации тест-полоску



Отрывать по перфорации тест-полоски следует с правой стороны карты, начиная сверху, с тем, чтобы на карте сохранился номер серии, напечатанный на левой стороне карты

2 Удалите защитную фольгу



3 Нанесите тестируемый сыворотки/плазмы крови



Нанесите 50 мкл образца сыворотки/плазмы с помощью микропипетки на стартовую зону тест-полоски (помечена стрелками)



Подождите 15 минут

4 Прочтите результат



Недействительные (отсутствует контрольная полоса)

