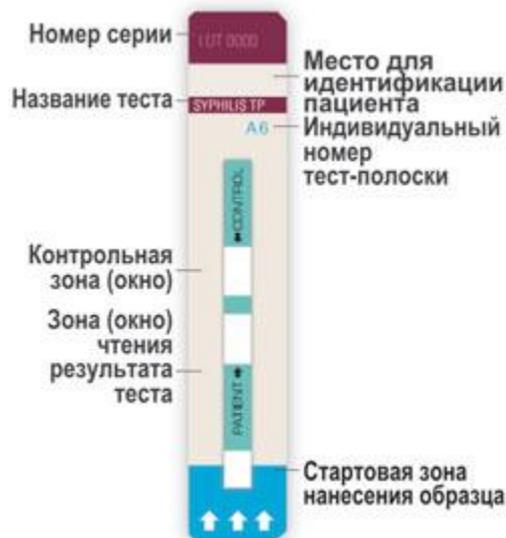


Экспресс-тест на Сифилис

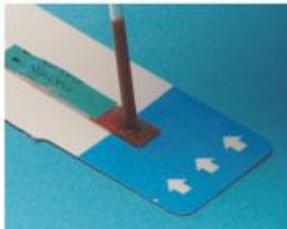
Determine™ Syphilis TP



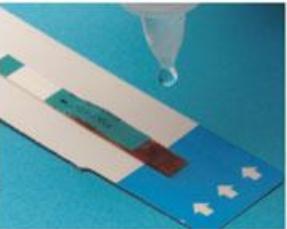
Постановка теста Детермин сифилис с цельной кровью

- 1 Отделите по перфорации тест-полоску**

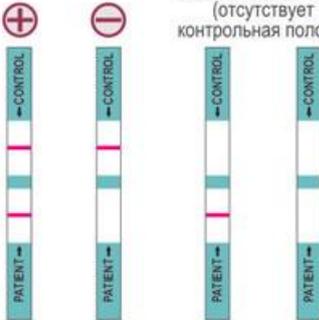

Отрывать по перфорации тест-полоски следует с правой стороны карты, начиная сверху, с тем, чтобы на карте сохранился номер серии, напечатанный на левой стороне карты
- 2 Удалите защитную фольгу**

- 3 Нанесите тестируемый образец крови**


Нанесите 50 мкл образца цельной крови, полученной из пальца или из вены, с помощью микропипетки или покрытого ЭДТА капилляра на стартовую зону тест-полоски (помечена стрелками)

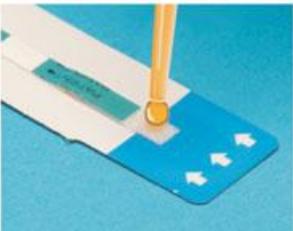
Подождите 1 минуту
- 4 Добавьте буфер**


Нанесите из капельницы, располагаемой строго вертикально, 1 каплю буфера на стартовую зону тест-полоски

Подождите 15 минут
- 5 Прочтите результат**


Недействительные (отсутствует контрольная полоса)

Постановка теста Детермин сифилис с сывороткой/плазмой крови

- 1 Отделите по перфорации тест-полоску**
- 2 Удалите защитную фольгу**
- 3 Нанесите тестируемый сыворотки/плазмы крови**

Отрывать по перфорации тест-полоски следует с правой стороны карты, начиная сверху, с тем, чтобы на карте сохранялся номер серии, напечатанный на левой стороне карты

Нанесите 50 мкл образца сыворотки/плазмы с помощью микропипетки на стартовую зону тест-полоски (помечена стрелками)



4 Прочтите результат

