

# Характеристики теста Детермин ВИЧ

## Determine™ HIV-1/2 Экспресс-тест на ВИЧ

Данные из отчета ВОЗ HIV assays: operational characteristics (Phase I). Report 12: simple/rapid tests, whole blood specimens. World Health Organization, 2002, WHO

Характеристики теста	Показатели
<b>Чувствительность</b> %, включая:	<b>100.0</b> (95.5 – 100.0)
ВИЧ-1-положительные образцы	100%
ВИЧ-2-положительные	100%
ВИЧ-1- положительные образцы субтипы А-Г	100%
ВИЧ-1 группа 0 положительные образцы	100%
Правильное определение всех положительных сывороток на 8 сероконверсионных панелях: 28 положительных образцов из 43 (референс ИФА-тест-система Enzygnost Anti-HIV1/2 Plus)	28/43
<b>Специфичность</b> %, включая:	<b>99.4</b> (96.7 – 100.0)
Отрицательные образцы сыворотки крови	99,89% <sup>1</sup>
Отрицательные образцы плазмы крови	100% <sup>1</sup>
Отрицательные образцы от беременных	100% <sup>1</sup>
Отрицательные образцы от пациентов с состояниями, отличными от ВИЧ-инфекции и потенциально интерферирующие субстанции	98,86% <sup>1</sup>
Отрицательные образцы от пациентов из Западной Африки	97,96% <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Всего протестировано 1,594 образца сыворотки и плазмы и цельной крови