



КАЖДАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

ALERE[™] HIV COMBO


Острая инфекция составляет 5–20%
от всех случаев ВИЧ-инфекции, выявленной
у людей, пожелавших пройти тестирование.¹

Новый стандарт скрининга ВИЧ



Alere™ HIV Combo — это визуальный качественный *in vitro* иммуноанализ, предназначенный для определения антител (Ab) к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и определения не входящего в иммунный комплекс (свободного) антигена (Ag) p24 ВИЧ-1 в капиллярной и венозной цельной крови, плазме или сыворотке человека.

Он позволяет обнаружить большее число острых инфекций по сравнению с тестами 2-го и 3-го поколений, помогает закрыть серонегативное окно и обладает лучшей эффективностью в период, когда человек очень заразен.

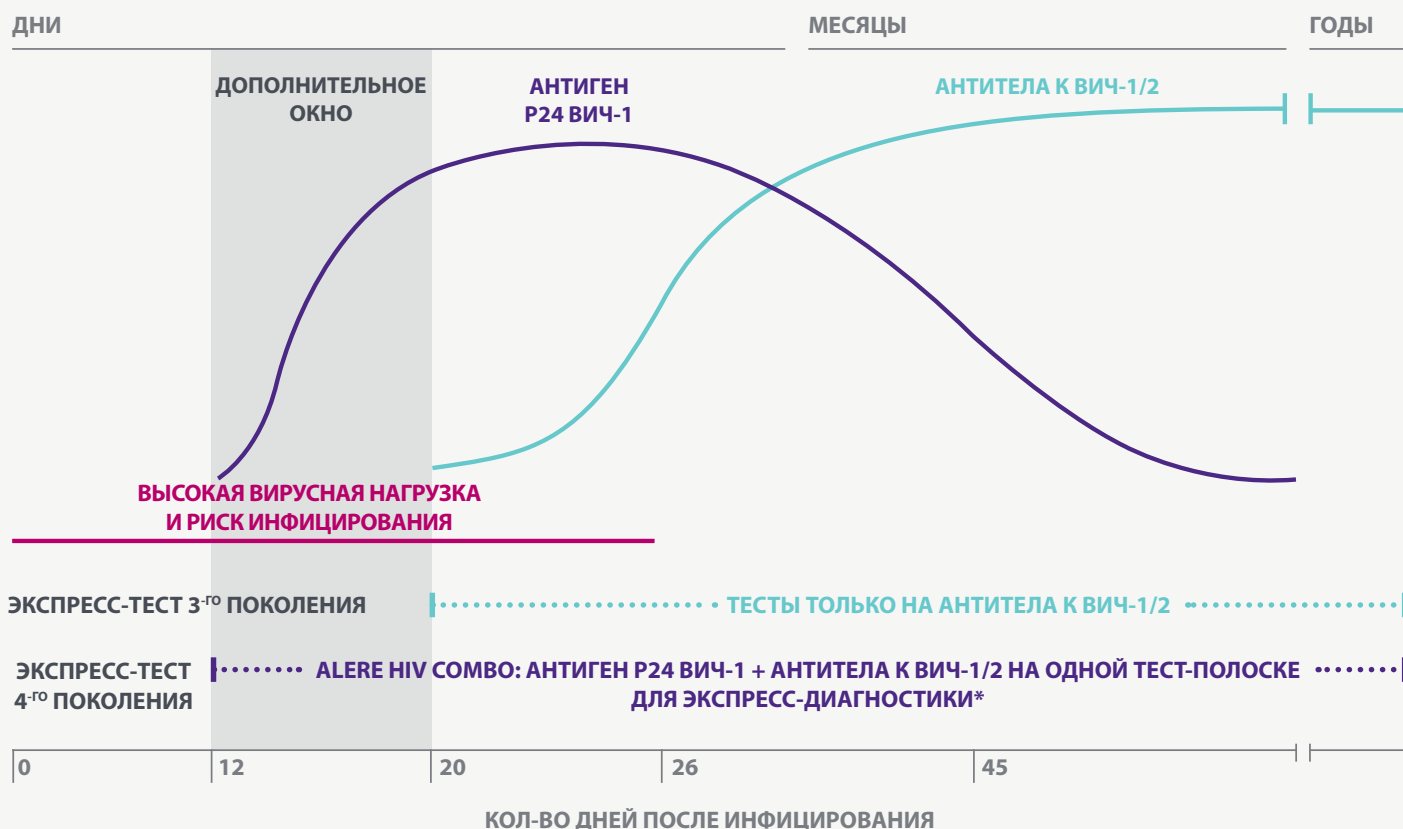

*НЕСОПОСТАВИМО С МОЛЕКУЛЯРНЫМ ТЕСТИРОВАНИЕМ

БОЛЬШАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Больше людей смогут узнать о состоянии своего здоровья в ходе тестирования во время приема.

РАННЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Повышает частоту обнаружения остроинфекционных людей.

БЫСТРЫЙ, ТОЧНЫЙ СКРИНИНГ

Позволяет закрыть серонегативное окно и обеспечивает надежность результатов при анализе во время приема.

РОС-тест 4-го поколения позволяет улучшить прогноз

УЛУЧШЕННЫЙ ПРОГНОЗ

Более раннее выявление ВИЧ приводит к улучшению результативности лечения.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА

Возможность быстрее назначить соответствующее лечение.


НЕМЕДЛЕННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Отсутствие необходимости во втором визите пациента для получения результата тестирования, возможность немедленного уведомления партнера.

БОЛЕЕ БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ

Быстрое направление на лечение и снижение риска дальнейшей передачи инфекции.



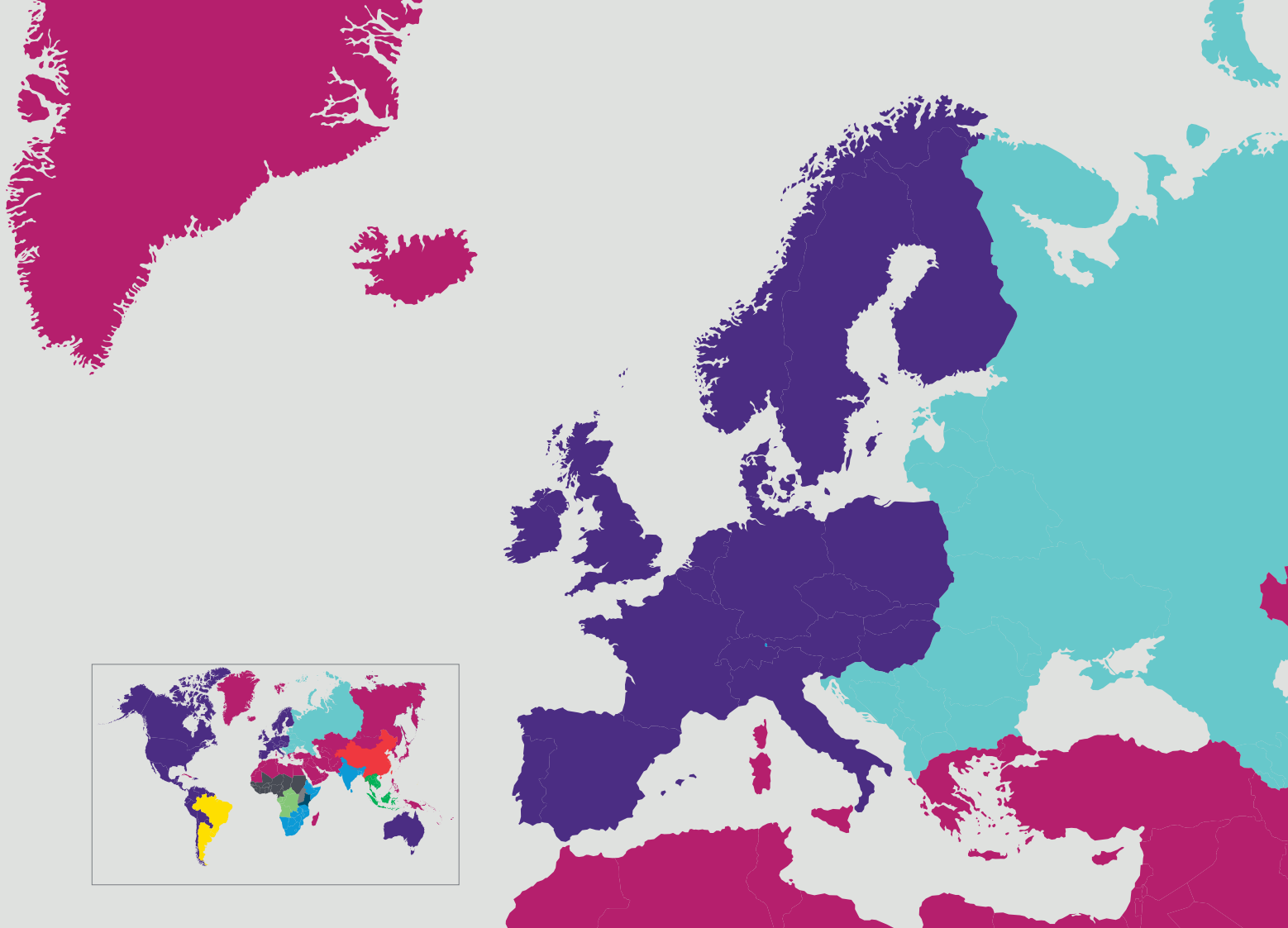

Характеристики

Чувствительность* 100%

Специфичность 99,72%

*Данные по аналитической чувствительности антигена р24 ВИЧ-1 представлены в листке-вкладыше.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Метод	ИФА на тест-полосках
Время получения результатов	20 минут
Условия хранения	2–30 °C
Объем образца	50 мкл
Срок годности теста	18 месяцев
Тип образца	Сыворотка/плазма, цельная кровь из пальца и цельная кровь из вены

Распределение подтипов ВИЧ-1 в Европе²

- B**
- CRF02_AG, ДРУГИЕ РЕКОМБИНАНТЫ**
- F, G, H, J, K, CRF01 ДРУГИЕ РЕКОМБИНАНТЫ**
- A, B, РЕКОМБИНАНТ АВ**
- B, C, РЕКОМБИНАНТ ВС**
- A**
- C**
- D**
- НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ**

АНТИГЕНЫ ВИЧ-1

Используя Alere™ HIV Combo, можно обнаружить ВИЧ-1 группы М подтипов A, B, C, D, F, G, H и CRF01-AE, CRF02-AG, а также ВИЧ-1 группы O.³

АНТИТЕЛА К ВИЧ

Используя Alere HIV Combo, можно обнаружить ВИЧ-1 группы М подтипов A, B, C, D, F, G, H, J, K, CRF01-AE, CRF02-AG, CRF03-AB, CRF05-DF, CRF09-A/U, CRF11-срх, ВИЧ-1 группы O и ВИЧ-2.³

Новые возможности ведения пациентов

Закрывая серонегативное окно, Alere HIV combo устанавливает новый стандарт для проведения тестирования во время приема. Этот простой тест обеспечивает быстрое получение точных результатов за 20 минут, предоставляя новые возможности для ведения пациента.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

НОМЕР ПРОДУКТА	ПО КАТАЛОГУ
Тестовый набор Alere™ HIV Combo 20 тестов	7D2846
Тестовый набор Alere™ HIV Combo 100 тестов	7D2847
Chase Buffer	7D2243
Капиллярные трубки EDTA (обернутые в майлар)	7D2227

Каждая возможность проведения тестирования имеет значение.

ОСТРАЯ ИНФЕКЦИЯ СОСТАВЛЯЕТ

5—20%

ОТ ВСЕХ СЛУЧАЕВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ВЫЯВЛЕННОЙ У ЛЮДЕЙ, ПОЖЕЛАВШИХ ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ.¹

Эта острая фаза инфекции ассоциируется с максимальными уровнями вирусемии и высоким риском передачи инфекции.

Более раннее, быстрое и точное выявление ВИЧ-положительных пациентов позволяет повысить частоту обнаружения инфекции и быстро направлять инфицированных людей на лечение.



**ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ
К РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ ПОСЕТИТЕ ABBOTT.COM/POCT.**

Ссылки

1. Branson, B and Stekler, J. D, Detection of Acute HIV Infection; We can't close the window, Journal of Infectious Disease, 2012, 205: 521-4.
2. Francine E. McCutchan, Henry M. Jackson Foundation (Rockville, Maryland). IAVI Report, August 2003 [online] available at <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/aids/atlas/clade.html>.
3. Alere HIV Combo Product Insert. Data on file.

© 2019 Abbott. Все права защищены. Все упоминаемые товарные знаки принадлежат либо группе компаний Abbott, либо соответствующим владельцам. Все представленные фотографии используются исключительно в иллюстративных целях. Все люди, изображенные на фотографиях, являются моделями. IDEM184747 120001735-07 06/19

