


# Alere HIV Combo процедура анализа

Экспресс-тест ВИЧ антиген-антитела (Аг-Ат)  
Производитель Alere Co. Ltd., Япония

Отделите необходимое количество тест-полосок, отрывая их по линии перфорации с правой стороны тест-карты, чтобы сохранить номер серии, нанесенный на левую сторону.

Верните неиспользуемые тест полоски в фольговый пакет и закройте его, нажав на полосу, герметизирующую горловину пакета, проследите наличие влагопоглотителя.

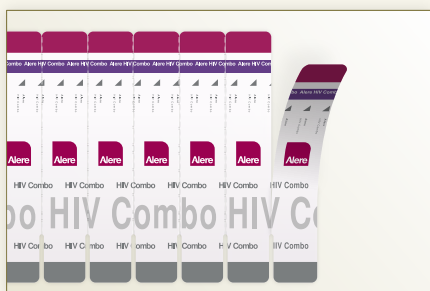


**Анализ проводить при температуре 15-30°C.**

Удалите защитную фольгу с каждой тест-полоски, анализ начните немедленно.

Добавьте 50мкл образца


Сыворотка,  
плазма

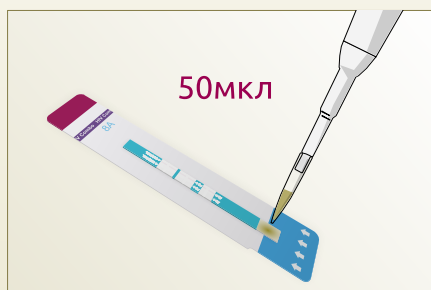

20  
минут

Цельная кровь

Венозная

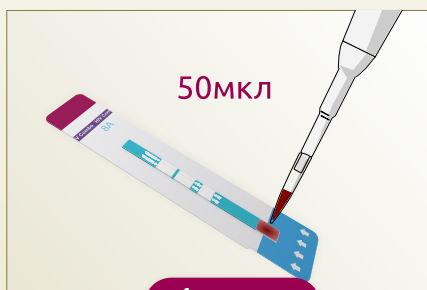

1 минута



20  
минут

Капиллярная



1 минута



20  
минут

Прочтите результат


## ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Результат анализа будет считаться положительным, даже если полосы в окнах учета результата (Ag, Ab) светлее или ярче, чем полоса в окне контроля (Control). Любая сколь угодно слабая полоса должна интерпретироваться как положительная.



## ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Наличие только одной полосы в окне контроля (Control).

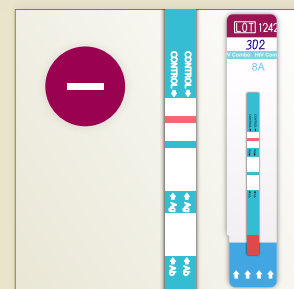

## НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отсутствие контрольной полосы (Control), даже при наличии других полос, указывает на недействительный результат.