

Тест-системы ИммуноКомб

16 лет в России

Тест-системы ИммуноКомб уже 16 лет успешно используются ведущими клиниками России.

Национальный проект



В 2007 и 2008 годах тест-системы ИммуноКомб поставлялись в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.

Диагностика

ВИЧ-инфекции,

HTLV,

Гепатитов А, В и С,

Хламидиоза,

Токсоплазмоза,

Краснухи,

Цитомегалии,

Хеликобактериоза,

Тропических инфекций

Всемирное признание

Рекомендованы МЗ СР для скрининга и обследования доноров.

Проверены и одобрены институтами П. Эрлиха, А. Фурниэ, AFSSAPS.

Отобраны для программ ВОЗ, ЮНЕСКО, Красного Креста.

Поставляются в 150 стран мира.

Поставляются в 1080 клиник России.



Иммуноферментные
бесприборные тест-системы



Чувствительность и
специфичность ~ 100%



Индивидуальное или
групповое тестирование



Исследование плазмы,
сыворотки или цельной крови



Количественная оценка
результата



Получение результата
анализа в течение ~ 40 минут



Себестоимость анализа
~ 88 рублей



Визуальное считывание
результатов



Результаты документируются



Отобраны для приоритетного
национального проекта
«Здоровье»




Сертифицированы CE




Сертифицированы ISO

Состав тест-системы ИммуноКомб

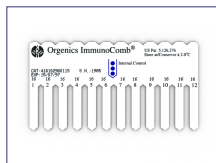


Гребень (3 шт.)

Каждый зубец Гребня
сенситизирован в двух или трех
точках:
верхняя точка - антителами к
человеческому иммуноглобулину
(внутренний контроль)
средняя и/или нижняя точка -
специфическими антигенами или
антителами.

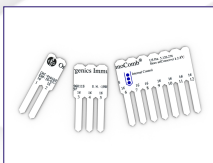

При необходимости гребень можно
снять и отломить зубцы для
индивидуального тестирования.

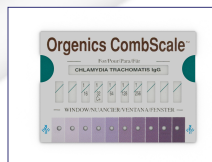


Цветная шкала CombScale

для количественного учета результата (титр антител,
ед/л, ед/мл)



Проявочная ванна (3 шт.)

Проявочная ванна имеет 6 рядов (А - F). В лунках каждого ряда
содержатся готовые к использованию растворы веществ:
А. растворитель образца
В. промывочный раствор
С. специфические реагенты, меченые щелочной фосфатазой
(конъюгат)
D. промывочный раствор
E. промывочный раствор
F. раствор хромогенного компонента

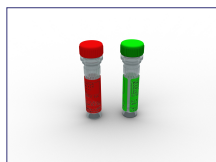


Отрицательный контроль

1 флакон (зеленая крышка) - разбавленная
инактивированная человеческая плазма,
отрицательная по искомым антителам/антигенам

Положительный контроль

1 флакон (красная крышка) - разбавленная
инактивированная человеческая плазма,
положительная по искомым антителам/антигенам

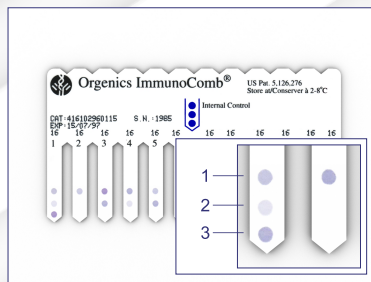


Результат анализа

Результат анализа проявляется в виде
окрашенных точек.

На рисунке:

1 Верхняя точка - внутренний контроль
2, 3 Средняя и нижняя точки - наличие
специфических антигенов или антител.

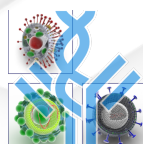

Биоград

ЗАО «БИОГРАД»

197110, г. Санкт-Петербург,

Петровский пр., д. 14, лит. А, пом. 19-Н

тел./факс: (812) 325 21 70, 325 21 71

e-mail: biograd@biograd.ru <http://www.biograd.ru>